

ПАКЕТ С РАСТВОРАМИ EASYLYTE Na⁺/K⁺

Кат. № 2109 400 мл

Кат. № 2120 800 мл

НАЗНАЧЕНИЕ

Пакет с растворами EasyLyte Na⁺/K⁺ предназначен для количественного определения ионов натрия (Na⁺) и калия (K⁺) в сыворотке, плазме, цельной крови и моче человека на анализаторе MEDICA EasyLyte®.

Только для профессионального применения. Только для диагностического применения *in vitro*.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Для определения электролитов в биологических жидкостях традиционно используется эмиссионная фотометрия. Создание органических соединений, обладающих селективностью к ионам натрия, калия и других веществ, позволило разработать датчики для прямого количественного определения этих веществ в биологических жидкостях в диапазоне физиологических концентраций. Такие датчики называют ионоселективными.

Натрий является основным катионом внеклеточной жидкости, который оказывает наибольшее влияние на осмотическое давление и распределение воды между клетками, плазмой и межклеточной жидкостью. Низкое содержание натрия (гипонатриемия) может быть следствием диареи, тяжелой полиурии, метаболического ацидоза, болезни Аддисона и поражения канальцев почек. Высокое содержание натрия (гипернатриемия) может быть связано с гипернадпочечниковым синдромом, тяжелой дегидратацией, травмой головного мозга, диабетической комой и избыточным введением растворов, содержащих соли натрия.

Калий является основным катионом внутриклеточной жидкости. Нарушение калиевого баланса оказывает прямое воздействие на возбудимость мышечных клеток, деятельность миокарда и дыхание. К состояниям, при которых нарушается уровень калия в крови, относятся гипоальдостеронизм, диарея, рвота, а также использование диуретиков в лечении артериальной гипертензии или заболеваний сердца. В отличие от натрия, механизм поддержания пороговой концентрации калия в организме отсутствует.

ПРИНЦИП, ЛЕЖАЩИЙ В ОСНОВЕ МЕТОДА

Анализатор EasyLyte измеряет содержание ионов натрия и калия в сыворотке, плазме, цельной крови и моче человека с помощью ионоселективных электродов. В конструкцию проточного натрий-селективного электрода входит селективная мембрана специального состава, чувствительная к ионам натрия. Калий-селективный электрод имеет аналогичную конструкцию с применением селективной мембраны из соответствующего материала. Потенциал каждого электрода измеряется по отношению к стабильному постоянному напряжению, которое создается референтным электродом с двойным электролитическим ключом (серебро/хлорид серебра). Ионоселективный электрод создает напряжение, которое меняется в зависимости от концентрации соответствующего иона. Концентрация детектируемых ионов и создаваемое напряжение связаны логарифмическим уравнением Нернста.

$$E = E^{\circ} + \frac{RT}{nF} \text{Log} (g C)$$

где: E — потенциал электрода в пробе
E[°] — потенциал, развиваемый при стандартных условиях
RT/nF — крутизна электродной функции, зависящая от температуры
n = 1 для ионов натрия и калия
Log — функция десятичного логарифма
g = коэффициент активности определяемого иона в растворе
C — концентрация определяемого иона в растворе

СОСТАВ РЕАГЕНТОВ

Пакет с растворами 400 мл (кат. № 2109)

Стандартный раствор А, 400 мл

140,0 ммоль/л Na⁺

4,0 ммоль/л K⁺

Буфер

Консервант

Смачивающий агент

Стандартный раствор В, 130 мл

35,0 ммоль/л Na⁺

16,0 ммоль/л K⁺

Буфер

Консервант

Смачивающий агент

Промывочный раствор, 50 мл

0,1 моль/л, гидродифторид аммония

Емкость для отработанного раствора

Пакет с растворами 800 мл (кат. № 2120)

Стандартный раствор А, 800 мл

140,0 ммоль/л Na⁺

4,0 ммоль/л K⁺

Буфер

Консервант

Смачивающий агент

Стандартный раствор В, 180 мл

35,0 ммоль/л Na⁺

16,0 ммоль/л K⁺

Буфер

Консервант

Смачивающий агент

Промывочный раствор, 80 мл

0,1 моль/л, гидродифторид аммония

Емкость для отработанного раствора

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Может вызвать раздражение кожи (H315)

Может вызвать раздражение глаз (H319)

При попадании на кожу смыть большим количеством воды с мылом (P302 + P352)

При попадании в глаза осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Если использовались контактные линзы, по возможности, снять линзы и продолжить промывание. (P305 + P351 + P338)



В процессе использования в пакет с растворами попадают биологические жидкости человека, и поэтому пакет считается биологически опасным. При обращении с пакетом с растворами и его утилизации следует принимать те же меры предосторожности, что и в отношении любых биологически опасных материалов. Утилизацию пакета необходимо выполнять согласно национальному законодательству.

УКАЗАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ПАКЕТОМ С РАСТВОРАМИ, ЕГО ХРАНЕНИЮ И КОНТРОЛЮ СТАБИЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК


Пакет с растворами поставляется в готовом к использованию виде. До истечения срока годности, указанного на этикетке, растворы в нераспакованном пакете имеют стабильные характеристики, если хранятся при температуре от 4 до 25 °С. После установки пакета с растворами в анализатор EasyLyte характеристики растворов остаются стабильными до истечения срока годности, указанного на этикетке. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ.

СНЯТИЕ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ПАКЕТА С РАСТВОРАМИ

Соблюдая стандартные меры предосторожности, предусмотренные в лаборатории, крепко возьмитесь за пакет с растворами и извлеките его из анализатора. НЕ СДАВЛИВАЙТЕ ПАКЕТ С РАСТВОРАМИ. Наденьте красный колпачок на четыре разъема пакета и утилизируйте пакет согласно национальному законодательству.


УСТАНОВКА НОВОГО ПАКЕТА С РАСТВОРАМИ

Извлеките новый пакет с растворами из транспортной упаковки. Отделите оранжевую этикетку. Запишите дату на отрывной части и закрепите ее на передней поверхности пакета с растворами. Запись на этикетке будет соответствовать дате установки пакета с растворами. Снимите красный колпачок. Установите пакет с растворами так, чтобы он плотно вошел в клапан-распределитель растворов.

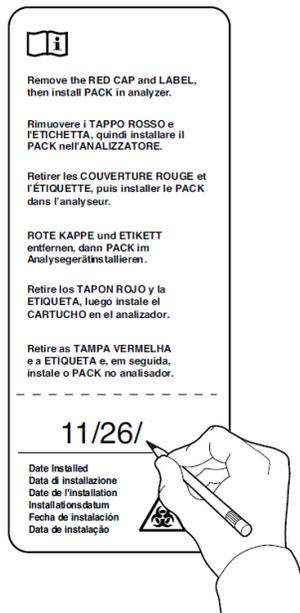

УКАЗАНИЯ ПО СБРОСУ СЧЕТЧИКА

Анализатор EasyLyte имеет внутренний счетчик, который отслеживает использование растворов из пакета. При каждой установке нового пакета с растворами счетчик (%) необходимо сбрасывать на ноль (0). После установки нового пакета с растворами войдите во **ВТОРОЕ МЕНЮ** и выберите пункт ***ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА?***. При нажатии кнопки **ДА** в ответ на запрос ***ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА?*** анализатор EasyLyte выводит на экран и на печать процент использования пакета с растворами. Нажмите **ДА** еще раз, после чего программное обеспечение анализатора EasyLyte автоматически распознает и выберет объем пакета (400 или 800 мл). На запрос **СБРОС ДО 0%?**, заданный для устанавливаемого пакета с растворами, нажмите **ДА**. Затем анализатор EasyLyte автоматически перейдет в режим *****ОЖИДАНИЕ*****. При повторной калибровке анализатор EasyLyte автоматически очистит все линии подачи растворов в новом пакете, чтобы обеспечить успешную калибровку.

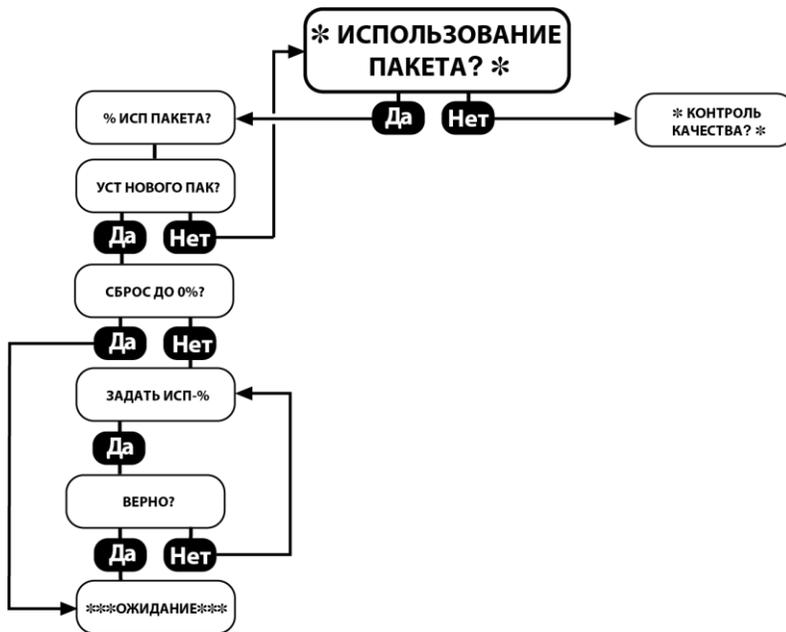

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения подробной информации и эксплуатационных характеристик см. Руководство пользователя EasyLyte.