

REF 10651 12 BOTELLAS DE 5mL

CALIBRADOR QUÍMICO

Cada vial contiene 5,0 mL de polvo multiconstituyente liofilizado de control de calidad, a base de suero.

USO PREVISTO

Usar como calibrador en ensayos de química clínica en el Analizador químico Medica EasyRA.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El material de origen humano a partir del cual se ha obtenido este producto se probó en la base de la unidad de donante única y resultó no ser reactiva para HBsAg, anti-HIV 1/2, anti-HCV y HIV-1Ag.

Sin embargo, como ningún método puede garantizar la seguridad completa con respecto a la ausencia de agentes infecciosos, este material y todas las muestras de los pacientes se deben manipular y desechar como si se tratara de materiales capaces de transmitir enfermedades infecciosas.

INSTRUCCIONES PARA LA MANIPULACIÓN, EL ALMACENAMIENTO Y LA ESTABILIDAD

El calibrador en seco es estable hasta la fecha de vencimiento en la etiqueta si se almacena a 2 - 8° C. Después de su reconstitución, guarde el calibrador cerrado a 2° - 8° C. Los componentes del calibrador son estables para:

Bilirrubina directa y total y hierro: conservación uno día sin luz a una temperatura de 2 - 8° C.
Otros analitos: conservación cinco días a una temperatura de 2 - 8° C.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de la reconstitución, deje que el vial alcance temperatura ambiente.
2. Reconstituya cuidadosamente cada vial de suero liofilizado con exactamente 5,0mL de agua de calidad reactivo a temperatura ambiente usando una pipeta volumétrica.
3. Reemplace la tapa y permita que el calibrador se asiente durante 20 minutos, dando movimientos circulares ocasionales.
4. Antes de tomar la muestra, mueva con suavidad el vial varias veces para garantizar la homogeneidad. NO AGITE.

Los volúmenes recomendados de la muestra del calibrador son los siguientes:

1. Si se calibra un solo analito, utilice 0,2 mL del calibrador en un vaso de muestra de 2 mL.
2. Si se calibran de 1 a 5 analitos, utilice 0,5 mL del calibrador en un vaso de muestra de 2 mL.
3. Si se calibran de 5 a 14 analitos, utilice 1,0 mL del calibrador en un vaso de muestra de 2 mL.

ASIGNACIÓN DE VALORES

La tabla a continuación muestra los valores asignados para cada analito:

Lot No. 21305 Fecha de vencimiento: 2025-09-30

Analito:	Valor asignado	Unidades
ALB	4,1	g/dL
DBIL	3,40	mg/dL
TBIL	4,67	mg/dL
Ca	9,86	mg/dL
CHOL	210	mg/dL
CREA	3,52	mg/dL
GLU H	197	mg/dL
GLU T	197	mg/dL
FE	185	µg/dL
LIP	104,9	µ/L
MG	3,20	mg/dL
PHOS	5,00	mg/dL
TP	6,2	g/dL
TRIG	121	mg/dL
BUN	36,4	mg/dL
URIC	5,20	mg/dL