

REF 10651 12 FLACONI DA 5 mL

CALIBRATORE CHIMICO

Fiale da 5,0 mL ciascuna di calibratore multicomponente in polvere a base di siero umano.

USO PREVISTO

Da usare come calibratore nelle analisi di chimica clinica sull'analizzatore chimico Medica EasyRA.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Il materiale umano da cui deriva questo prodotto è stato testato a livello di singola unità donatore ed è stato riscontrato non reattivo ad HBsAg, anti-HIV 1/2, anti-HCV e HIV-1Ag. Tuttavia, poiché nessun metodo può offrire la certezza assoluta che siano assenti agenti infettivi, tale materiale e tutti i campioni dei pazienti devono essere manipolati e smaltiti come potenziale veicolo di malattie infettive.

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA STABILITÀ

Il calibratore a secco si mantiene stabile fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta se conservato ad una temperatura di 2-8° C. Dopo averlo ricostituito, conservare il calibratore ben chiuso ad una temperatura di 2-8° C. Stabilità dei componenti del calibratore:

- Bilirubina diretta e totale e ferro: 1 giorno di conservazione al buio a 2-8 °C.
- Altri analiti: 5 giorni di conservazione a 2-8 °C.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Prima di ricostituire il calibratore, attendere che la fiala si riscaldi fino a raggiungere la temperatura ambiente.
2. Ricostituire con cautela ciascuna fiala di siero liofilizzato con esattamente 5,0 mL di acqua di grado reagente a temperatura ambiente utilizzando una pipetta volumetrica.
3. Riposizionare il tappo e lasciare riposare il calibratore per 20 minuti, miscelando di tanto in tanto.
4. Prima di eseguire il campionamento miscelare delicatamente la fiala alcune volte per assicurare l'omogeneità. NON AGITARE SUL VORTEX.

I volumi consigliati di calibratore e campione sono i seguenti:

1. Se si calibra un solo analita utilizzare 0,2 mL di calibratore in una coppetta per campioni da 2 mL.
2. Se si calibrano 1-5 analiti utilizzare 0,5 mL di calibratore in una coppetta per campioni da 2 mL.
3. Se si calibrano 5-14 analiti utilizzare 1,0 mL di calibratore in una coppetta per campioni da 2 mL.

ASSEGNAZIONE VALORI

Nella tabella seguente sono indicati i valori assegnati per ciascun analita:

N° lotto: 21305 Scadenza: 2025-09-30

Analita:	Valore assegnato	Unità
ALB	4,1	g/dL
DBIL	3,40	mg/dL
TBIL	4,67	mg/dL
Ca	9,86	mg/dL
CHOL	210	mg/dL
CREA	3,52	mg/dL
GLU H	197	mg/dL
GLU T	197	mg/dL
FE	185	µg/dL
LIP	104,9	µ/L
MG	3,20	mg/dL
PHOS	5,00	mg/dL
TP	6,2	g/dL
TRIG	121	mg/dL
Urea-N (BUN)	36,4	mg/dL
URIC	5,20	mg/dL