

REF 10794 FIOŁKI 12 X 5 ml, POZIOM B

MATERIAŁ DO CHEMICZNEJ/ELEKTROLITY KONTROLI JAKOŚCI, POZIOM B

Każda fiolka zawiera 5,0 ml liofilizowanego, opartego na surowicy ludzkiej, wieloskładnikowego proszku do kontroli jakości (QC).

ZASTOSOWANIE

Do stosowania jako materiał do kontroli jakości w klinicznych próbach chemicznych w analizatorze Medica EasyRA® (Medica EasyRA Chemistry Analyzer).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA

Źródłowy materiał ludzki, na podstawie którego powstał niniejszy produkt, został przetestowany dla każdego dawcy i nie wykazał reakcji na antygen HBS, HIV 1 / 2, HCV oraz HIV-1.

Ponieważ jednak żadna metoda nie może zapewnić całkowitej pewności co do braku czynników zakaźnych, materiał ten oraz wszystkie próbki pacjentów powinny być traktowane i utylizowane tak, jak gdyby były potencjalnymi nośnikami chorób zakaźnych.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYCIA, PRZECHOWYWANIA I STABILNOŚCI

Materiał do kontroli jakości w postaci suchej pozostaje stabilny aż do upływu daty ważności (na etykiecie), jeśli jest przechowywany w temp. 2 - 8°C. Po rozpuszczeniu przechowywać materiał do kontroli jakości zamknięty w temp. 2 - 8°C. Składniki materiału pozostają stabilne przez:

- Bilirubina bezpośrednia i całkowita: 3 dni, przechowywanie w ciemności w temp. 2 - 8°C.
- Inne analizy: 5 dni, przechowywanie w temp. 2 - 8°C.

Uwaga: alkalicznej poziom ALP wzrośnie na przestrzeni okresu stabilności.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed stworzeniem roztworu należy odczekać, aż fiolka ogrzeje się do temperatury otoczenia.
2. Ostrożnie rozpuścić każdą fiolkę surowicy liofilizowanej w dokładnie 5,0 ml wody odczynnikowej w temperaturze otoczenia. Przy użyciu pipety wolumetrycznej.
3. Założyć korek i odstawić kontrolę na 20 minut, od czasu do czasu poruszając fiolką.
4. Przed próbkowaniem delikatnie poruszać fiolką ruchem obrotowym, aby zapewnić jednolitość roztworu. **NIE WYTRZĄSAĆ.**

ZAKRESY KONTROLI JAKOŚCI (QC)


W tabeli poniżej znajdują się dopuszczalne zakresy kontroli jakości dla każdego analitu: Poziom B, Partia nr 22251, Data ważności: 2025-07-31

Analit	Jednostki	Poziom B
ALB	g/dl	4,4 (3,9 – 4,9)
ALP	U/l	260 (220 – 300)
ALT	U/l	98,6 (83,6 – 113,6)
AMY	U/l	252 (230 – 274)
AST	U/l	164,9 (149,9 – 179,9)
DBIL	mg/dl	2,14 (1,44 – 2,84)
TBIL	mg/dl	6,26 (5,46 – 7,06)
CA	mg/dl	11,22 (10,22 – 12,22)
CO ₂	mmol/l	17,2 (12,2 – 22,2)
CHOL	mg/dl	213 (193 – 233)
CK	U/l	374 (324 – 424)
CREA	mg/dl	5,99 (5,49 – 6,49)
FE	μg/dl	164 (134 – 194)
GGT	U/l	89 (80 – 98)
GLUH	mg/dl	211 (196 – 226)
GLUT	mg/dl	208 (193 – 223)
HDL	mg/dl	63 (53 – 73)
LDH	U/l	331 (281 – 381)
LDL	mg/dl	110 (100 – 120)
LIP	U/l	231,2 (191,2 – 271,2)

MG	mg/dl	3,61 (3,11 – 4,11)
PHOS	mg/dl	6,92 (6,42 – 7,42)
TIBC	μg/dl	413 (383 – 443)
TP	g/dl	6,8 (5,8 – 7,8)
TRIG	mg/dl	219 (204 – 234)
BUN	mg/dl	45,1 (39,1 – 51,1)
URIC	mg/dl	9,14 (8,14 – 10,14)
Na+	mmol/l	151,1 (146,1 – 156,1)
K+	mmol/l	6,55 (6,15 – 6,95)
Cl-	mmol/l	102,8 (97,8 – 107,8)
Li+	mmol/l	2,01 (1,71 – 2,31)



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA

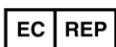

Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands