

REF 10651 12 X FRASCOS DE 5 mL

CALIBRADOR QUÍMICO

Cada ampola contém 5 mL de pó calibrador multicomponente, baseado em soro humano liofilizado.

INDICAÇÃO DE USO

Utilizado como calibrador em análises de química clínica do Analisador Químico EasyRA Medica.

PRECAUÇÕES E AVISOS DE SEGURANÇA

O material de origem humana do qual este produto foi derivado e testado em caráter de doador único, e determinado como não-reagente para HBsAg, anti-HIV 1 / 2, anti-HCV e HIV-1Ag.

Entretanto, como nenhum método pode oferecer certeza absoluta em relação à ausência de agentes infecciosos, este material e todas as amostras de pacientes devem ser manuseados e descartados como se pudessem potencialmente transmitir doenças infecciosas.

INSTRUÇÕES DE MANUSEIO, ARMAZENAGEM E ESTABILIDADE

O calibrador seco permanecerá estável até a data de validade informada no rótulo desde que armazenado a 2-8 °C. Após a reconstituição, armazene o calibrador fechado a 2-8 °C. Os componentes do calibrador são estáveis por:

Bilirrubina e ferro diretos e totais: 1 dia, armazenados no escuro a 2° - 8°C.

Outros analitos: 5 dias, armazenados a 2° - 8°C.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Antes da reconstituição, permita que a ampola aqueça até a temperatura ambiente.
2. Reconstitua cuidadosamente cada uma das ampolas de soro liofilizado com exatamente 5 mL de água grau reagente à temperatura ambiente usando uma pipeta volumétrica.
3. Recoloque a rolha e deixe o calibrador em repouso por 20 minutos, agitando ocasionalmente.
4. Antes de colher a amostra, misture a ampola delicadamente com vários movimentos circulares para garantir a homogeneidade. NÃO AGITE.

Os volumes de calibrador de amostra são os seguintes:

1. Se estiver calibrando um único analito, use 0,2 mL de calibrador em um copo de amostra de 2 mL.
2. Se estiver calibrando 1 a 5 analitos, use 0,5 mL de calibrador em um copo de amostra de 2 mL.
3. Se estiver calibrando 5 a 14 analitos, use 1,0 mL de calibrador em um copo de amostra de 2 mL.

VALORES ATRIBUÍDOS

A tabela a seguir contém os valores atribuídos a cada analito:

Lote N° 24093 Validade: 2027-12-31

Analito:	Valor atribuído	Unidade
ALB	4,3	g/dL
DBIL	3,08	mg/dL
TBIL	4,75	mg/dL
Ca	9,57	mg/dL
CHOL	201	mg/dL
CREA	3,46	mg/dL
GLU H	196	mg/dL
GLU T	195	mg/dL
FE	179	µg/dL
LIP	79,6	µ/L
MG	3,13	mg/dL
PHOS	4,80	mg/dL
TP	6,5	g/dL
TRIG	112	mg/dL
BUN	36,3	mg/dL
URIC	5,23	mg/dL