

REF 10659 6 X FRASCOS DE 1 mL

KIT DE CALIBRADOR DE PROTEÍNA C-REATIVA (CRP)

Cada ampola contém 1 mL do calibrador estável em líquido com diferentes níveis de CRP baseados em material de origem humana. Este conjunto de vários calibradores foi fabricado para a Medica Corporation.

INDICAÇÃO DE USO

Este kit de calibrador é indicado para uso para a calibração da análise CRP da Medica no Analisador Químico Clínico EasyRA® quando usado em conjunto com o reagente para CRP EasyRA. Os calibradores de CRP são utilizados para estabelecer pontos de referência que são usados na determinação de valores na medição de CRP no soro e no plasma humanos. Para uso em diagnósticos *in vitro*. Somente para uso profissional.

PRECAUÇÕES E AVISOS DE SEGURANÇA

O material de origem humana do qual este produto foi derivado foi testado e determinado como não-reagente para HBsAg, anti-HIV 1 / 2, anti-HCV e HIV-1 Ag.

Entretanto, como nenhum método pode oferecer certeza absoluta em relação à ausência de agentes infecciosos, este material e todas as amostras de pacientes devem ser manuseados e descartados como se pudessem potencialmente transmitir doenças infecciosas.

INSTRUÇÕES DE MANUSEIO, ARMAZENAGEM E ESTABILIDADE

Os calibradores permanecerão estáveis até a data de validade informada no rótulo quando armazenados a 2 – 8 °C. Depois que os calibradores forem abertos, armazene o calibrador fechado a 2 – 8 °C. Os calibradores abertos são estáveis por três meses a 2 – 8 °C.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Antes de abrir a ampola do calibrador, permita que ela aqueça até a temperatura ambiente por 20 minutos.
2. Misture delicadamente com movimentos circulares ou inversão. **Não agite.**
3. Os multicalibradores da proteína C-reativa são analisados usando o mesmo procedimento das amostras de teste dos pacientes usadas no procedimento de teste. Consulte o folheto informativo do reagente para proteína C-reativa da Medica.

VALOR ATRIBUÍDO

Os valores são atribuídos à série de calibradores de CRP usando um método imunoturbidimétrico aprimorado por látex, com referência ao material padronizado com base em uma Preparação de Referência Internacional (ERM-DA472).

A tabela a seguir contém os valores atribuídos ao calibrador de CRP:
Consulte o rótulo da ampola para cada lote quanto aos valores exatos do calibrador.


Lote Nº 24048 Validade: 2025-02-28

Analito:**Valor atribuído****Valores do calibrador para EasyRA**

	mg/L
EasyCal CRP Nível 1	0,0
EasyCal CRP Nível 2	2,5
EasyCal CRP Nível 3	10,0
EasyCal CRP Nível 4	20,0
EasyCal CRP Nível 5	80,0
EasyCal CRP Nível 6	160,0



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA

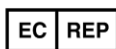

Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands