

REF 10793 12 X FRASCOS DE 5 mL, NÍVEL A

MATERIAL PARA CQ DE QUÍMICA/ELECTRÓLITOS

Cada ampola contém 5 mL de pó multicomponente para CQ, baseado em soro humano liofilizado.

INDICAÇÃO DE USO

Utilizado como material de controle de qualidade nas análises de química clínica do Analisador Químico EasyRA® Medica.

PRECAUÇÕES E AVISOS DE SEGURANÇA

O material de origem humana do qual este produto foi derivado, foi testado em caráter de doador único e determinado como não-reagente para HBsAg, anti-HIV 1 / 2, anti-HCV e HIV-1 Ag. Entretanto, como nenhum método pode oferecer certeza absoluta em relação à ausência de agentes infecciosos, este material e todas as amostras de pacientes devem ser manuseados e descartados como se pudessem potencialmente transmitir doenças infecciosas.

INSTRUÇÕES DE MANUSEIO, ARMAZENAGEM E ESTABILIDADE

O material de CQ seco permanecerá estável até a data de validade informada no rótulo desde que armazenado a 2-8 °C. Após a reconstituição, armazene o material de CQ fechado a 2-8 °C. Os componentes do material de CQ são estáveis por:

Bilirrubina direta e total: 3 dias, armazenados no escuro a 2-8 °C.

Outros analitos: 5 dias, armazenados a 2-8 °C.

Obs.: Os níveis de ALP aumentarão durante o período de estabilidade.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Antes da reconstituição, permita que a ampola aqueça até a temperatura ambiente.
2. Reconstitua cuidadosamente cada uma das ampolas de soro liofilizado com exatamente 5,0 mL de água grau reagente à temperatura ambiente, usando uma pipeta volumétrica.
3. Recoloque a rolha e deixe o controle descansar por 20 minutos, misturando ocasionalmente.
4. **Antes de coletar a amostra, agite delicadamente o frasco várias vezes para assegurar a homogeneidade. NÃO USE TURBILHONAMENTO.**

Intervalos de CQ


A tabela a seguir contém os intervalos de CQ aceitáveis para cada teste utilizando o Reagente EasyRA Medica apropriado: Nível A, Lote Nº 25008, Validade 2027-10-31

Analito	Unidade	Nível B
ALB	g/dL	2,7 (2,4 – 3,0)
ALP	U/L	65 (53 – 77)
ALT	U/L	55,1 (48,1 – 62,1)
AMY	U/L	55 (48 – 62)
AST	U/L	46,4 (40,4 – 52,4)
DBIL	mg/dL	0,35 (0,05 – 0,65)
TBIL	mg/dL	0,72 (0,52 – 0,92)
CA	mg/dL	8,49 (7,79 – 9,19)
CO ₂	mmol/L	9,2 (6,2 – 12,2)
CHOL	mg/dL	79 (67 – 91)
CK	U/L	86 (66 – 106)
CREA	mg/dL	0,76 (0,56 – 0,96)
FE	µg/dL	65 (45 – 85)
GGT	U/L	39 (35 – 43)
GLUH	mg/dL	99 (93 – 105)
GLUT	mg/dL	98 (92 – 104)
HDL	mg/dL	24 (19 – 29)
LDH	U/L	100 (85 – 115)
LDL	mg/dL	26 (21 – 31)
LIP	U/L	72,4 (57,4 – 87,4)
MG	mg/dL	1,29 (1,09 – 1,49)
PHOS	mg/dL	4,38 (3,98 – 4,78)
TIBC	µg/dL	218 (188 – 248)
TP	g/dL	4,2 (3,7 – 4,7)
TRIG	mg/dL	100 (92 – 108)
BUN	mg/dL	11,5 (8,5 – 14,5)
URIC	mg/dL	3,33 (2,63 – 4,03)

Na+	mmol/L	124,4 (119,4 – 129,4)
K+	mmol/L	3,94 (3,64 – 4,24)
Cl-	mmol/L	83,1 (78,1 – 88,1)
Li+	mmol/L	0,72 (0,42 – 1,02)



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA

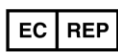

Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands