

REF 10657 POZIOM CAL 1 3 FIOŁKI X 1 ml
 POZIOM CAL 2 3 FIOŁKI x 1 ml

ZESTAW KALIBRATORÓW DO TIBC

Każda fiolka zawiera liofilizowane preparaty z nieaktywnymi stabilizatorami i dodatkami na dwóch poziomach TIBC, niskim i wysokim, w oparciu o źródłowy materiał ludzki.

PRZEZNACZENIE

Zestaw kalibratorów TIBC przeznaczony jest do użycia podczas kalibracji badania TIBC Medica w analizatorze chemicznym EasyRA[®]. Wyłącznie do diagnostycznego stosowania *in vitro*. Do stosowania wyłącznie przez profesjonalny personel.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

1. Przy postępowaniu z odczynnikami laboratoryjnymi należy stosować zwykłe środki ostrożności.
2. Materiał pochodzenia ludzkiego, na podstawie którego przygotowano ten produkt, został przebadany. Badania nie wykazały obecności przeciwciał HBsAg, anty-HIV 1/2, anty-HCV ani HIV-1Ag. Jednak w związku z tym, że żadna metoda nie może zagwarantować absolutnej pewności odnośnie do braku obecności tych czynników zakaźnych, materiał ten oraz wszystkie próbki pacjentów powinny być traktowane i utylizowane jak potencjalne nośniki chorób zakaźnych. Por. podręcznik National Institute of Health, „Biosafety in Microbiology and Biomedical Laboratories,” 2. wyd., 1988.
3. Nie pipetować ustami. Unikać połknięcia i kontaktu ze skórą.
4. Jako środek konserwujący kalibratory w opisywanym zestawie zawierają azydek sodu. W metalowych rurach azydek sodu może tworzyć związki o właściwościach wybuchowych. Po wylaniu materiału do systemu kanalizacji spłukać dużą ilością wody.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYCIA, PRZECCHOWYWANIA I STABILNOŚCI

Przed rozcieńczeniem kalibratory pozostają stabilne do upływu terminu ważności podanego na etykiecie, jeśli są przechowywane w temperaturze 2–8°C. Po rozcieńczeniu przechowywać zamknięte w temperaturze 2–8°C. Otwarte kalibratory są stabilne przez 10 dni w temperaturze 2–8°C.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Przed rozcieńczeniem należy odczekać, aż fiolka ogrzeje się do temperatury otoczenia.
2. Ostrożnie rozpuścić każdą fiolkę surowicy liofilizowanej w dokładnie 1,0 ml wody odczynnikowej w temperaturze otoczenia.
3. Zamknąć fiolkę i pozostawić do odstania na 30 minut. Wymieszać przez delikatne wirowanie lub odwracanie. Sprawdzić, czy materiał został całkowicie rozcieńczony. **Nie wstrząsać.**

WARTOŚCI USTALONE

W tabeli poniżej podano wartości ustalone dla kalibratorów TIBC:

Partia nr: 24233 Data ważności: 2025-11-30

Analit:	Wartość ustalona	Jednostki
EasyCal TIBC Poziom 1	107	µg/dl
EasyCal TIBC Poziom 2	729	µg/dl