

REF 10657 CALIB. NÍVEL 1 FRASCOS, 3 X 1mL
CALIB. NÍVEL 2 FRASCOS, 3 X 1mL

MULTICALIBRADOR QUÍMICO PARA TIBC

Os frascos contêm preparados liofilizados com estabilizantes e aditivos não reagentes em dois níveis diferentes (alto e baixo) de TIBC com base em material de origem humana.

INDICAÇÃO DE USO

O conjunto do Multicalibrador para TIBC se destina à calibração do teste de TIBC Medica no Analisador Químico Clínico EasyRA[®]. Para uso somente em diagnósticos *in vitro*. Somente para uso profissional.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. As precauções normais devem ser seguidas no manuseio de reagentes de laboratório.
2. O material de origem humana do qual este produto foi derivado, foi testado e determinado como não reagente para HBsAg, anti-HIV 1/2, anti-HCV e HIV-1 Ag. Entretanto, como nenhum método pode oferecer garantia absoluta da ausência de agentes infecciosos, este material e todas as amostras de pacientes devem ser manuseados e descartados como se pudessem potencialmente transmitir doenças infecciosas. Consulte o Manual do Instituto Nacional de Saúde dos EUA, "Biossegurança em laboratórios biomédicos e de microbiologia", 2a ed., 1988.
3. Não pipete com a boca. Evite a ingestão e o contato com a pele.
4. Os calibradores deste kit utilizam azida de sódio como conservante. A azida de sódio pode formar compostos explosivos em linhas de drenagem de metal. Quando descartar o material em sistemas de tubulações/encanamento, enxágue com quantidades abundantes de água.

INSTRUÇÕES DE MANUSEIO, ARMAZENAGEM E ESTABILIDADE

Antes da reconstituição, os calibradores permanecem estáveis até a data de validade indicada no rótulo, desde que armazenados fechados a 2 - 8°C. Após a reconstituição, guarde os calibradores tampados a 2 - 8°C. Os calibradores abertos permanecem estáveis por 10 dias a 2 - 8°C.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Antes da reconstituição, permita que os frascos atinjam a temperatura ambiente.
2. Reconstitua cuidadosamente cada um dos frascos de soro liofilizado com exatamente 1,0 mL de água grau reagente à temperatura ambiente.
3. Feche o frasco e deixe descansar por 30 minutos. Misture girando ou invertendo o frasco delicadamente. Inspeção se o material dissolveu completamente. **Não chacoalhe.**

ATRIBUIÇÃO DE VALORES

A tabela a seguir contém os valores atribuídos aos Calibradores para TIBC:

Lote Nº 24233 Validade: 2025-11-30

Análito:	Valor atribuído	Unidades
EasyCal TIBC Nível 1	107	µg/dL
EasyCal TIBC Nível 2	729	µg/dL