

REF 10797 6 x 1mL 瓶装, 1 级

## C 反应蛋白 (CRP) 质控品 1 级

西林瓶装, 每瓶含基于稳定蛋白的 C 反应蛋白 (CRP) 质控品 1mL。

### 预期用途

EasyRA CRP 质控品目的是用作在 EasyRA® 临床化学分析仪上使用 EasyRA CRP 试剂和校准品进行 CRP 免疫比浊分析法的质控品。

仅用于体外诊断用途。 仅供专业人员使用。

### 关于搬运、贮藏和稳定性的说明

未打开的质控品如于 2-8°C 下贮藏, 在标签上列出的有效期内是稳定的。开封后的质控品如于 2-8°C 下贮藏, 可稳定 3 个月。

### 安全措施和警告

- 1 对制备本品的人源材料, 已进行逐一测试, 确定没有 HBsAg、抗-HIV 1 / 2、抗-HCV 和 HIV-1 Ag 的反应。但由于没有一种方法能完全保证不存在感染因子, 处理本材料和所有患者样本时, 应把他们视作能传播感染性疾病的材料和样本。
- 2 该产品含有叠氮化钠作为防腐剂。避免摄入或与皮肤或粘膜接触。如发生皮肤接触, 应用大量的水冲洗受影响部位。如发生眼部接触或摄入, 应立即就医处理。请参考化学品安全说明书中的危险、危害和安全信息。

### 使用说明

- 1 在打开质控品小瓶之前, 让质控品回温至环境温度, 持续 20 分钟。
- 2 轻轻颠倒几次以确保内容物均匀性。避免形成泡沫。按照试验方法要求, 以对待患者样品的方式处理质控品。
- 3 在试验过程中采用与患者试验样品相同的方式来处理 C 反应蛋白质控品。参考 Medica C 反应蛋白试剂插页说明。
- 4 不用时, 应立即重新盖上质控品瓶盖, 并于 2-8°C 下贮存。

### 质控范围

#### 赋值

每个批次的 CRP 质控品的值采用胶乳增强免疫比浊法指定, 并参考对照适当国际参考品 (CRM470) 标准化的材料。

下表包含 CRP 的合格质控范围: 1 级

批号 25006 失效期 2027-08-28

分析物:	所赋值	单位
EasyQC CRP 1 级	0.97 – 1.45	mg/L



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive  
Bedford, MA 01730-1413 USA



Emergo Europe, Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague, The Netherlands