

# MEDICA CALIBRADOR EASYCAL

REF 10653 6 X FRASCOS DE 1 mL

## CALIBRADOR DE HDL PARA QUÍMICA

Cada ampola contém 1 mL de soro humano liofilizado contendo lipoproteínas de diversas classes, incluindo lipoproteínas de alta densidade.

Obs.: Os valores de colesterol HDL são rastreáveis ao método de referência para HDL do Centro de Controle de Doenças (CDC).

## INDICAÇÃO DE USO

Utilizado como calibrador de HDL para o teste de colesterol HDL do Analisador Químico EasyRA Medica.

## PRECAUÇÕES E AVISOS DE SEGURANÇA

O material de origem humana do qual este produto derivou foi testado em caráter de doador único e determinado como não-reagente para HBsAg, anti-HIV 1 / 2, anti-HCV e HIV-1 Ag.

Entretanto, como nenhum método pode oferecer certeza absoluta em relação à ausência de agentes infecciosos, este material e todas as amostras de pacientes devem ser manuseados e descartados como se pudessem potencialmente transmitir doenças infecciosas.

## INSTRUÇÕES DE MANUSEIO, ARMAZENAGEM E ESTABILIDADE

O calibrador seco permanecerá estável até a data de validade informada no rótulo desde que armazenado a 2-8 °C.

Após a reconstituição, armazene o calibrador fechado a 2-8 °C. O calibrador reconstituído permanece estável por 14 dias a 2-8 °C. A estabilidade após reconstituição pode ser estendida por meio de alíquotagem e congelamento do calibrador reconstituído a temperaturas inferiores a -70 °C.

As alíquotas de calibrador de HDL congelado permanecem estáveis por até 4 semanas a -70 °C.

## INSTRUÇÕES DE USO

1. Antes da reconstituição, permita que a ampola aqueça até a temperatura ambiente.
2. Reconstitua cuidadosamente cada uma das ampolas de soro liofilizado com exatamente 1 mL de água grau reagente à temperatura ambiente.
3. Feche a ampola e deixe em repouso por 20 minutos. Misture delicadamente com movimentos circulares ou inversão.  
**Não agite.**

## VALORES ATRIBUÍDOS


A tabela a seguir contém os valores atribuídos ao calibrador de HDL:

Lote Nº 26043 Validade: 2027-12-01

Analito:	Valor atribuído	Unidade
Colesterol HDL	58	mg/dL



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive  
Bedford, MA 01730-1413 USA

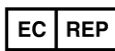

Emergo Europe, Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague, The Netherlands