

MEDICA CREA-U CAL

REF 10652 1 BOTELLA DE 10 mL

CALIBRADOR PARA CREATININA EN ORINA

Cada vial contiene 10 mL de creatinina en ácido clorhídrico 0,10N. El ácido clorhídrico (0,1 N) es utilizado para estabilizar la creatinina. La concentración del calibrador CREA-U Medica ha sido verificada con el Instituto de Standards Nacional y Tecnológico Creatinina (SRM 914^a).

USO PREVISTO

Para usar como calibrador de creatinina en orina para el análisis de creatinina de Medica en el Analizador químico Medica EasyRA.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Siga las normas de seguridad en el laboratorio. Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de ingerirlo, vea a un médico inmediatamente. Use guantes y gafas protectoras. En caso de contacto, lávese con abundante agua y consulte a un médico. El ácido hidroclicórico es corrosivo.

INSTRUCCIONES PARA LA MANIPULACIÓN, EL ALMACENAMIENTO Y LA ESTABILIDAD

El calibrador líquido es estable hasta la fecha de vencimiento de la etiqueta si se almacena a 2° - 8° C.

Una vez abierto, el calibrador debe guardarse a 2° - 8° C. No se debe usar si se encuentra turbio o nebuloso.

INSTRUCCIONES DE USO

Listo para usar.

ASIGNACIÓN DE VALORES

La tabla a continuación contiene los valores asignados para el calibrador de creatinina en Orina:

Lot No. 26086 Vencimiento: 2027-03-27

Analito:	Valor asignado	Unidades
Creatinina	146.7	mg/dL



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA



Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands