

# MEDICA CREA-U CAL

REF 10652      ФЛАКОНЫ 1 X 10 МЛ

## КАЛИБРАТОР КРЕАТИНИНА МОЧИ

Флаконы, содержащие по 10 мл креатинина в 0,10 N соляной кислоты.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Для использования в качестве калибратора при оценке уровня креатинина мочи с помощью набора для анализа креатинина мочи Medica в биохимическом анализаторе Medica EasyRA.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Придерживайтесь правил надлежащей лабораторной практики.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И СТАБИЛЬНОСТИ

Жидкий калибратор стабилен при хранении при 2 – 8 °C до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Открытый калибратор следует хранить при температуре 2 – 8 °C.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Готов к использованию.

## ПРИСВОЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ


В нижеприведенной таблице содержатся присвоенные значения для калибратора креатинина мочи:

Номер лота. 26086      Годен до: 2027-03-27

| Анализируемое вещество: |       | Присвоенное значение | Единицы |
|-------------------------|-------|----------------------|---------|
| Креатинин               | 146,7 | мг/дл                |         |



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive  
Bedford, MA 01730-1413 USA

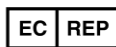

Emergo Europe, Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague, The Netherlands